



LIGASANO®

Tryckavlastning och aktivt upprensande förband



LIGASANO®

Tamponad av polyuretan / Tamponade af PU-skum / Tamponade av polyuretan

Höggradigt rent / Rent / Rent produkt

Ett aktivt upprensande förband till våtskändesår / En aktiv opprensande förbinding til væskende sår / En aktiv opprensende bandage til væskende sår

DE - HARTMANN Scandinavia AB, Box 24, 334 21 ANDERSTORP
DK - FALCK HARTMANN A/S, 3400 Hillvoed
NO - FRUK HARTMANN AS, Hultevik 48, 0377 Gao

Ligasano® - tryckavlastning

Trycksår uppstår när hud eller vävnad utsätts för konstant tryck och otillräcklig eller utebliven blodcirkulation under längre eller kortare tid. Stoppas cirkulationen tillräckligt länge, dör ett antal celler och blodflödet får allt svårare att återvända. Inom några dagar faller de döda cellerna samman och trycksåret är ett faktum. Orsaker till trycksår är tryck mot huden, skjuvning, fuktig hud eller torr hud med sprickor.

LIGASANO tryckavlastning är tillverkad av skummad polyuretan. LIGASANO tryckavlastning (vit) finns i olika storlekar. LIGASANO klimatplatta (grön) är en polyuretanplatta med större porer än den vita plattan. Genom att porerna är större har den en grövre ytstruktur och ger en högre luftgenomsläpplighet.

Den gröna LIGASANO klimatplattan får aldrig placeras direkt mot huden. Den skall **alltid** användas så att den ligger **under** den **vita**. Patientens vikt avgör hur många plattor som skall användas. Man kan klippa till LIGASANO för avlastning av olika kroppsdelar.

Egenskaper

- LIGASANO tryckavlastning ger en jämn tryckfördelning och är helt luftgenomsläpplig. Fukt och värme ackumuleras ej mot huden, vilket bidrar till bibehållen normal hudtemperatur.
- Ytstrukturen minskar den s.k. skjuvningseffekten i vävnadsskiktet och minskar friktionen mot huden.
- Risken för ischemi förhindras och därmed uppkomsten av trycksår.
- LIGASANO är lätt att forma och anpassa till det aktuella behandlingsområdet. Ett bra sätt att kontrollera att patienten tryckavlastas ordentligt är att lägga handen mellan underlaget och LIGASANO och testa att det inte känns några konturer från kroppen.
- Rekommendationen vid användning är att de stora belastningsställena t.ex. sacrum skall avlastas med mer material än lättare ställen som t.ex. hälar.
- LIGASANO klimatplatta (grön) är avsedd att användas som uppbyggnadsmaterial (bottenplatta) under LIGASANO tryckavlastning (vit). **Klimatplattan får aldrig användas direkt mot hud eller vävnad.**



Användning

Tryckavlastning vid profylaktisk behandling samt som terapi vid redan uppkomna trycksår.

Tryckavlastning kan ske mellan tår och fingrar, under bröst, i ljumskar, i händer med kontrakturer mm.

Sammanfattning

- Tillför luft
- Absorberar sekret
- Förhindrar att hud ligger mot hud
- Lakan skall ej användas ovanpå
- Man glider inte på LIGASANO - minskad skjuvningseffekt

Tvättinstruktion

LIGASANO tryckavlastning och klimatplatta tål värme upp till 121°C. Vid upprepad tvättning bryts materialet succesivt ner, vilket minskar produktens funktion. OBS! LIGASANO kan missfärgas i ljus.



Rekommenderad LIGASANO-tjocklek

Patientvikt	Tjocklek vid sacrum	Tjocklek vid häla
Under 45 kg	2 cm	1 cm
Upp till 75 kg	minst 3 cm	2 cm
Över 75 kg	minst 4 cm	3 cm

Ligasano® - sårhäkning

LIGASANO är ett aktivt upprensande förband av skummad polyuretan med absorptionsceller i form av stora porer. LIGASANO absorberar 15-20 gånger sin egen vikt, vilket ger en snabb upprensning av såret. Absorptionen sker vertikalt och minskar därmed risken för maceration av frisk vävnad. LIGASANO är helt luftgenomsläpplig, vilket gör att fukt och värme ej ackumuleras mot vävnaden.

Egenskaper

LIGASANO absorberar vertikalt dvs utan att sårvätskan sprids i sidled. På så sätt skyddas sårkanterna och risken för maceration minskar.

Användning

LIGASANO används främst till vätskande och infekterade sår t.ex. bensår, diabetessår, trycksår och brännskador. LIGASANO kan formas som utfyllnad av sårhålor och fistlar.

Klipp till LIGASANO efter sårets form. Placera LIGASANO med ett lätt tryck i direkt kontakt med såret. LIGASANO har god effekt vid behandling och vid förebyggande av svampinfektioner.

Bytesfrekvensen är beroende av sårets sekretion.

Materialets ytstruktur påverkar vävnaden vilket till att börja med kan ge en ökad sekretion. Allt eftersom såret rensas upp avtar sekretionen varvid LIGASANO byts med längre intervaller.

OBS! Om tamponad används i fistlar skall man kontrollera att hela tamponaden kommer ut vid borttagandet och inga rester av tamponaden blir kvar i fistelgången.

Sammanfattning

- Effektiv upprensning
- Färre omläggningar
- Absorberar sekret
- Enkel användning
- Bättre ekonomi



Diabetessår orsakat av olämplig och trång sko.



Diabetessår med klinisk infektion sepsis, blod-tad sena.



Sårhål/fistlar.



Bensår Venöst/arteriellt (blandsår)

Foto: Christina Lindholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Sortiment	Storlek	Afp	Tfp
Ligasano Tryckavlastning	49 x 59 x 1 cm	14 st	6 Afp
	49 x 59 x 2cm	7 st	6 Afp
	200 x 50 x 2 cm	1 st	6 Afp
	200 x 100 x 1 cm	2 st	5 Afp
	200 x 100 x 2 cm	1 st	4 Afp
Ligasano Tryckavlastning, klimatplatta	55 x 45 x 2 cm	7 st	4 Afp
Ligasano kompresser	15 x 15 x 1 cm	10 st	11 Afp
	15 x 15 x 2 cm	5 st	11 Afp
	24 x 16 x 1 cm	10 st	6 Afp
Ligasano Binda/tamponad	3m x 5cm x 0,3cm	8 st	12 Afp