



# Cosmopor Advance®

## Självhäftande absorptionsförband

Cosmopor Advance är ett självhäftande, absorberande förband med DryBarrier Technology vilket innebär att sårdynan består av tre olika lager som samverkar tillsammans för en optimal sårhäkning. Sårdynan absorberar snabbt upp exsudat som lagras i det översta lagret och skyddar såret mot återvätning. Dynans kontaktyta är belagd med ett polyethylenät vilket gör att förbandet inte fastnar i såret och kan tas bort utan att patienten upplever smärta.

DryBarrier Technology



Fastnar inte i såret

Rundade hörn förhindrar  
att förbandet rullar sig



### Indikation

För postoperativ sårvård och som sterilt skydd vid mindre sårskador.

### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Cosmopor Advance är ett självhäftande, absorberande förband med DryBarrier technology.

### Egenskaper

Cosmopor Advance är ett självhäftande, absorberande förband för postoperativ vård och sterilt skydd för mindre sår. Sår dynan består av DryBarrier Technology vilket innebär att sår dynan består av superabsorbenta fibrer (SAF). Sår dynan suger snabbt upp exsudat och vätska, och håller såret torrt. Sår dynan fastnar ej i såret och förbandet kan tas bort utan att patienten upplever smärta.


### Material

Förbandet består av non-woven polyester. Sår dynan består av tre olika lager. Kontaktlagret har en yta av polyethylenät vilket gör att förbandet ej fastnar i såret. Transportlagret består av viskos och hjälper till att absorbera upp exsudat. Det tredje och sista lagret består av superabsorbenta fibrer vilket gör att förbandet permanent absorberar stora mängder exsudat samtidigt som det skyddar mot återvätning, även under tryck. Häftkanten har en syntetiskt baserad häftmassa som är fri från kolofonium och latex.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av förbandet.

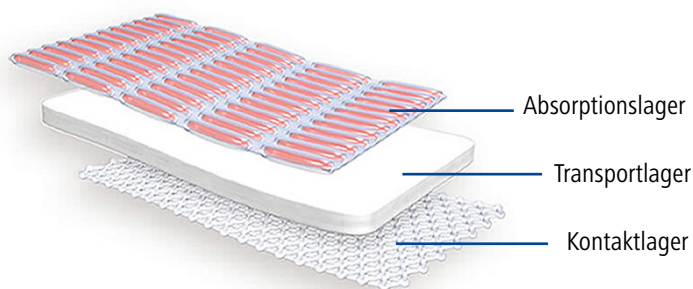

| Sortiment                 | Storlek    | Art.nr. | Afp   | Tfp    |
|---------------------------|------------|---------|-------|--------|
| <b>Cosmopor Advance®</b>  | 7,2 x 5 cm | 901010  | 25 st | 20 Afp |
| Steril, enstycksförpackad | 10 x 6 cm  | 901011  | 25 st | 24 Afp |
|                           | 15 x 6 cm  | 901012  | 25 st | 18 Afp |
|                           | 10 x 8 cm  | 901013  | 25 st | 18 Afp |
|                           | 15 x 8 cm  | 901014  | 25 st | 12 Afp |
|                           | 20 x 10 cm | 901015  | 25 st | 10 Afp |

## Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Absorberande

Fri från kolofonium och latex

Bekväm att bära