




Hydrosorb®/Hydrosorb® comfort

Transparent gelförband

Vid behandling av torra kroniska sår fungerar Hydrosorb som en mjukgörare, förbandet löser upp och absorberar eventuell nekrotisk vävnad. När exsudat kapslas in i förbandet får såret en bättre miljö att läka i. Den fuktiga miljön som skapas ger de nybildade cellerna möjlighet att snabbt förflytta sig över hela sårytan och utveckla ny vävnad. Förbandet är mjukt, följsamt och bekvämt för patienten att bära.

Hydrosorb comfort har en bred häftkant för att underlätta fixering.

Absorberar sin egen vikt på 48 timmar

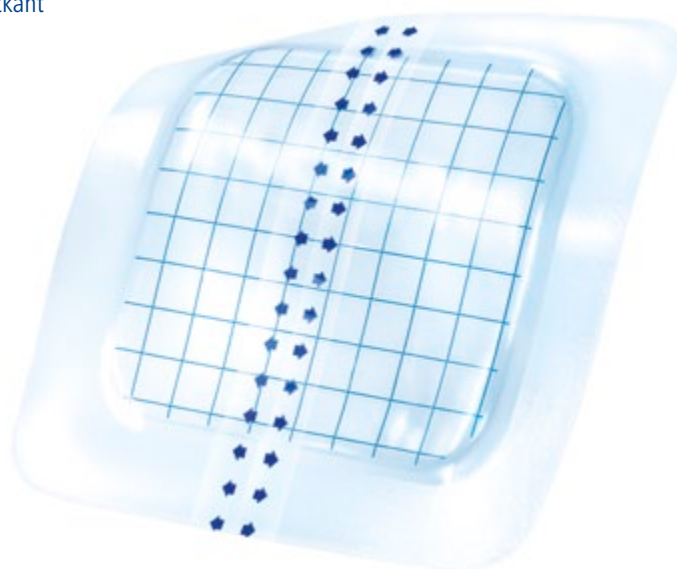

Består av 60% vatten



Indikation

För behandling av kroniska sår med dålig läkningsfrekvens och liten exsudatmängd, t.ex. bensår och trycksår. Kan även användas vid 2:a gradens brännskador och tagställen. Fungerar som mjukgörare och löser upp nekrotisk vävnad.

Kontraindikationer:

Bör inte användas om klinisk infektion föreligger eller vid 3:e gradens brännskador.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Hydrosorb är ett transparent gelförband täckt av en semi-permeabel bakterie- och vattentät folie.

Egenskaper


Hydrosorb skapar en fuktig sårmiljö och lämpar sig för behandling av kroniska sår. Under granulationsfasen främjar Hydrosorb nybildning av vävnad. Med Hydrosorb kan den fuktiga sårmiljön upprätthållas även under längre behandlingsperioder. Förbandet kan sitta på plats i upp till 7 dagar beroende på sårets tillstånd. Under epitelialiseringssfasen underlättar Hydrosorb celldelningen och cellernas förflyttning genom den fuktiga sårmiljön. Hydrosorb löser upp och absorberar nekrotisk vävnad.

Förbandet kan bytas utan att irritera den nya vävnaden och utan att patienten känner smärta då förbandet inte fastnar i såret. Eftersom Hydrosorb är transparent kan såret enkelt inspekteras utan förbandsbyte. Hydrosorb har dessutom genom gelens mjukelastiska egenskaper en god polstringseffekt som skyddar såret från yttre påverkan.

Material

Hydrogelförband täckt med ett skikt av semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen är gjord av polyuretan i matrixstruktur som innehåller ca 60% vatten. Hydrosorb comfort har en akrylat-baserad häftmassa.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

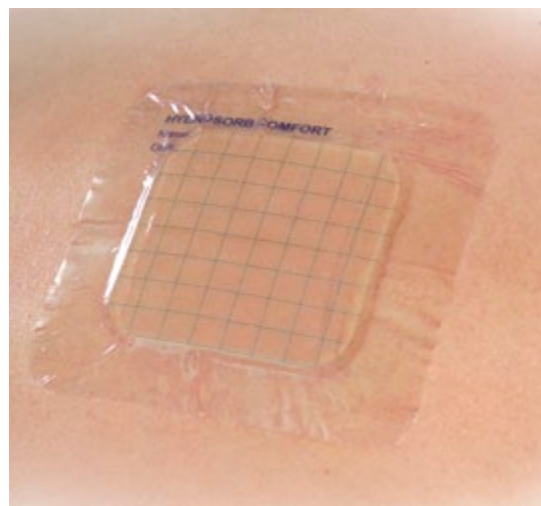

Hydrosorb Comfort.

Tips

För fixering av Hydrosorb rekommenderas fixeringsbinda eller tejp. Hydrosorb comfort har däremot en häftkant som smidigt håller förbandet på plats.

Hydrosorb har en transparent dokumentationsfilm som gör det enkelt att följa sårets läkning. Här kan namn, datum och sårets storlek enkelt märkas ut och smidigt föras över till patientens journal.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrosorb®	5 x 7,5 cm	900 853	5 st	6 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 10 cm	900 854	5 st	6 Afp
	20 x 20 cm	900 855	3 st	5 Afp
Hydrosorb® comfort	4,5 x 6,5 cm	900 702	5 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad	7,5 x 10 cm	900 706	5 st	6 Afp
	12,5 x 12,5 cm	900 723	5 st	6 Afp

Fördelar:

Upprensande

Enkel hantering

Mjuk patientkomfort

Skyddar såret

Integrerad dokumentation